

2016年6月

お客様各位

## ライフパック CR プラスの安全性確保に関する重要なお知らせ

今般、弊社が製造販売する自動体外式除細動器ライフパック CR プラスの、ある特定時期に生産された製品の一部で、電源スイッチを押しても正常に動作しない可能性がある事が判明致しました。調査の結果、製品に使用している部品に本不具合を発生させる可能性のあるものが混在しておりました。当該事象の発生確率は極めて低く、又、現在までにこの事象による健康被害発生のご報告は、国内外ともにてありませんが、弊社では自主的に当該部品を交換する事を決定致しました。

該当製品をお持ちのお客様には、今後、弊社又は弊社販売パートナー様より順次ご連絡を差し上げ、修理を進めて参ります。お手元の該当製品を修理させていただくまでの間、お手数をおかけして誠に恐縮ではございますが、下記の手順に従って装置の定期的な動作確認をお願い致します。

ご使用者の皆様には多大なるご心配とお手数をお掛けすることになり、深くお詫び申し上げます。今後とも、更なる品質向上に努めてまいりますので、何卒ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

以上

### 動作確認方法

「**電源オン/オフ ボタン**」を押して製品の上蓋を開けます。

フタが開くのと同時に、「**直ちに助けを呼んでください**」という音声が出るかを確認してください。

\* 音が出ない場合には、直ちにお買い求めの販売店様窓口までご連絡をお願い致します。

「**電源オン/オフ ボタン**」を2秒以上押し、必ず製品の電源を切ってください。「**ピッポッパ**」という音が鳴り、電源が切れます。

\* 蓋を閉めただけでは電源は切れません。正しく電源を切らないと電池が消耗してしまいます。

製品の上蓋を閉めて保管してください。

\* 電源を切った際、ステータスインジケータに OK が表示されていない場合には、直ちにお買い求めの販売店様窓口までご連絡をお願い致します。



電源オン/オフ  
ボタン